



カテリープラス®ロール



概要

- 3つの思いやりをさらにプラス

医療スタッフが望む「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」は、相反する特性のため、従来の粘着剤では両立が困難でした。

カテリープラス®は、新開発のウレタンジェル粘着剤がこれまでにない「透湿性」(当社比)を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで両立。

「高透湿」「高固定」「低刺激」の3つの思いやりをさらにプラスした、「新しい固定」をご提案いたします。

《未滅菌品》

特長

- 高透湿でいつもさらさら

新開発のウレタンジェル粘着剤は、一般的なアクリル系粘着剤の約7倍の高い透湿性(当社比)。発汗等によるムレを抑え、長時間の貼付でも快適です。


- 高固定でしっかりあんしん

ウレタンジェル粘着剤をフィルム全面にムラなくコーティングしているため、ジェル状粘着剤が皮膚の凹凸にしっかりと密着。しなやかなフィルムが皮膚の動きに追従し、長期間の安定した固定力を実現します。


- 低刺激で肌にやさしい

適度な粘着力のウレタンジェル粘着剤が、**はがす際の角質のはく離・損傷を軽減**します。伸びの良いフィルムにより、貼付中の皮膚へのストレスも緩和。かぶれやはく離時の痛みを抑えた、やさしい貼り心地です。

- 『プレリフト加工(離型フィルム)』 手袋をしたままでも取扱いが簡単です。
- 『伸びの良いフィルム』 自然な貼り心地で、皮膚へのストレスを軽減します。
- 『防水・バクテリアバリア性』 外部からの水や細菌の侵入を防ぎます。
- 『優れた滑り性』 衣類・シーツとの摩擦が低減されます。

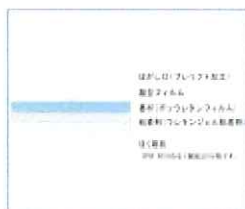

使用方法

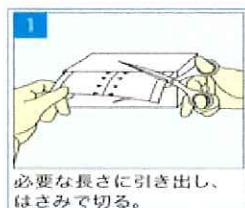

必要な長さに引き出し、はさみで切り出す



はがし口(切れ目)から中央のはく離紙をはがす



残ったはく離紙の端を持って所定の位置に貼り付ける



残ったはく離紙をはがし、しっかり押さえる。

離型フィルムを矢印部からゆっくりはがす。



残った離型フィルムをゆっくりはがす。

用途

- ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定
- チューブ・カテーテル固定
- 皮膚被覆保護
- ストーマ・CAPD患者のシャワー浴時の装具補強・保護等

使用上の注意

- 未滅菌品ですので創傷部位や穿刺部に直接使用しないでください。
- 感染のある部位、出血している部位、滲出液のある部位、皮膚障害、皮膚代謝異常がみられる部位には使用しないでください。
- 本品は固定縫合の代わりとしては使用できません。
- 貼付前に皮膚をよく清拭し、清潔で乾いた状態にしてください。
- 皮膚カブレやはがれの原因となりますので、引っ張って伸ばした状態で貼付しないでください。
- 使用中、皮膚障害その他異常がみられた時は、使用を中止してください。
- 臨床的に感染を起こしたと判断される場合は使用を中止し、適切な治療を行い感染の問題が解決してから使用を再開してください。
- シャワー、入浴の際は必ず前もって、水が入らないよう全面に密着していることを確認してください。
- 使用後には皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

貯蔵・保管方法

- 貯蔵・保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

規格

品番	サイズ	1箱
----	-----	----

CPSR0510	50mm×10m	1巻
CPSR1010	100mm×10m	1巻
CPSR1510	150mm×10m	1巻

[お電話でのお問い合わせ] **03-5978-5622**

ニチバン株式会社 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00

13:00～17:00

(土・日・祝日を除く)

Copyright©2013 NICHIBAN CO., LTD. All rights reserved.